

DIAGNOSTIC[®] NC PRO

**Bezdotykowy termometr
na podczerwień**

**Non-contact infrared
Thermometer**

**Non-Contact
Infrared
Thermometer**



**Non-Contact
Sleep - Friendly
Thermometer**



**Ambient
and Surface
Temperature
Measurement**



**One - second
Measurement**



**Fever
Alarm**



**Backlight
Display**



**Mute
mode**

**Plastic case
included**

**DIAGNOSTIC[®]
NC PRO**

**Bezdotykowy
termometr na
podczerwień**

**Non-contact
Infrared
Thermometer**



DIAGNOSTIC[®] NC PRO

Bezdotykowy termometr na podczerwień

INSTRUKCJA UŻYCIA



Przed rozpoczęciem korzystania z urządzenia należy uważnie zapoznać się z niniejszą instrukcją użycia. Wyrobu używaj wyłącznie zgodnie z jego przeznaczeniem opisanym w niniejszej instrukcji. Samodzielny pomiar oznacza kontrolę, a nie diagnozę. Nie podejmuj żadnych działań o charakterze medycznym bez uprzedniej konsultacji z lekarzem.

Szanowni Państwo,
dziękujemy za wybranie naszych wyrobów. Bezdotykowy termometr dla dzieci i dorosłych Diagnostic NC PRO ma szeroki zakres pomiarowy, który pozwala na stosowanie go jako termometru do pomiaru temperatury ciała, a także:

- temperatury powierzchni mleka w butelce dla niemowląt;
- temperatury powierzchni wody do kąpieli dla niemowląt;
- temperatury otoczenia.

Najnowsza technologia z wykorzystaniem czujnika podczerwieni umożliwia pomiar temperatury na czole w 1 sekundę.

Unikalna konstrukcja urządzenia z wbudowanym czujnikiem podczerwieni zapewnia dokładne i wiarygodne wyniki pomiarów.

Bezdotykowy termometr Diagnostic NC PRO umożliwia łatwe i proste dokonywanie pomiarów temperatury.

Temperatura może być mierzona nawet u śpiącego dziecka bez konieczności zakłócania snu.

Pomiar jest szybki, co jest bardzo wygodne podczas pomiaru temperatury u dziecka.

Po włączeniu urządzenie automatycznie wyświetla przez 2 sekundy ostatni pomiar.

5 sparowanych sygnałów dźwiękowych i czerwone podświetlenie ekranu LCD ostrzega użytkownika, że temperatura ciała jest równa lub wyższa niż 37,5 °C.

1. PRZEZNACZENIE WYROBU

Bezdotykowy termometr Diagnostic NC PRO umożliwia pomiar temperatury ciała na czole oraz w innych miejscach. Urządzenie jest przeznaczone do użytku domowego. Nie należy używać urządzenia do innych celów. Urządzenie jest przeznaczone do pomiaru temperatury, zarówno u dzieci, jak i u dorosłych.

KARTA GWARANCYJNA

pieczętka sklepu i podpis sprzedawcy

NAZWA URZĄDZENIA

MODEL

NUMER FABRYCZNY

DATA SPRZEDAŻY

WARUNKI GWARANCJI

1. Diagnosis S.A. udziela gwarancji:
 - 24 miesiące na termometr Diagnostic
 - wady sprzętu ujawnione w okresie gwarancji będą usuwane bezpłatnie w terminie 21 dni. Termin liczy się od dnia dostarczenia sprzętu do serwisu.
2. Nabywcy przysługuje prawo wymiany sprzętu na wolny od wad, w przypadku gdy:
 - naprawa nie została wykonana w terminie określonym w punkcie 1.
 - uprawniony punkt serwisowy stwierdził wadę fabryczną niemożliwą do usunięcia
 - w okresie gwarancji wykonane zostały 4 naprawy, a sprzęt nadal wykazuje wady uniemożliwiające używanie go zgodnie z przeznaczeniem.Pojęcie naprawa nie obejmuje czynności związanych ze sprawdzeniem i czyszczeniem sprzętu.
3. Gwarancją nie są objęte: baterie, wyroby z nieczytelnym lub zniszczonym numerem fabrycznym, uszkodzenia powstałe w skutek niezgodnego z instrukcją obsługi użytkownika i przechowywania, dostanie się do wnętrza płynów lub ciał obcych, przepięcie w sieci zasilającej, naprawy przez osoby niepowołane oraz zdarzeń losowych.
4. Wadliwy sprzęt nabywca powinien dostarczyć na adres serwisu głównego lub jednego z Autoryzowanych Punktów Serwisowych.
5. Gwarancja na sprzedany towar konsumpcyjny nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawieszają uprawnień kupującego wynikających z niezgodności towaru z umową.
6. Jediną podstawą uprawnień gwarancyjnych jest karta gwarancyjna z wpisaną datą sprzedaży, pieczętka i podpisem sprzedawcy. Karta niewypełniona, źle wypełniona, ze śladami poprawek i wpisów przez osoby nieupoważnione, nieczytelna w skutek zniszczenia - jest nieważna.


UWAGA! Przed wysyłką urządzenia do naprawy prosimy o uprzednie jego wyczyszczenie z wszelkiego rodzaju zabrudzeń.

WYTWÓRCA
Diagnosis S.A.
ul. Gen. W. Andersa 38A
15-113 Białystok, Polska
www.diagnosis.pl

SERWIS GŁÓWNY
Diagnosis S.A.
ul. Przemysłowa 8,
16-010 Wasilków
Tel. 85 874 60 45
serwis@diagnosis.pl

INFOLINIA
800 70 30 11
POŁĄCZENIE BEZPŁATNE
dla telefonów stacjonarnych
+48 85 874 69 28
dla telefonów komórkowych
(koszt połączenia ponosi dzwoniący
zgodnie z taryfą operatora)

Sprzedawca : NEUCA SA 87-100 Toruń, ul. Forteczna 35-37
tel. 800 807 008
NIP : 879-00-17-162
REGON : 870227804
Wystawiający : Hurtownia Farmaceutyczna NEUCA SA
54-610 Wrocław, ul. Graniczna 8a
Zezwolenie : GIF-N-411/882/MSH/14 z 30.12.2014
(108226)
Konto : Bank Millennium S.A. 88 1160 2202 0000 0000 6090 4065
Bank PeKaO S.A. 77 1240 1936 1111 0010 0192 0676
Santander Bank Polska S.A. 22 1090 1506 0000 0001 0116 5738
ING Bank Śląski S.A. 76 1050 1416 1000 0023 4335 4896
BNP Paribas Bank Polska S.A. 54 1600 1462 1806 7198 7000 0001
Bank PKO BP S.A. 28 1020 5011 0000 9602 0013 0450
CAIXA Bank S.A. 14 2390 0004 0011 0000 0000 6815
Credit Agricole Bank Polska S.A. 11 1940 1210 0103 7922 0010 0000

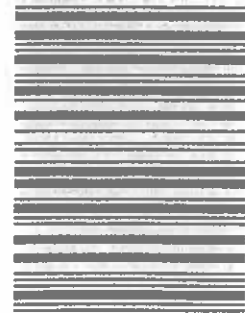

Faktura nr 1781349321
Data wystawienia: 2024.09.24
Data sprzedaży : 2024.09.24

/Kod: 320837/

Odbiorca : APTEKA SZPITALNA
51-162 WROCLAW, JANA DLUGOSZA 4
Zezwolenie : WIF-WR-I.8540.1.6.2020 z dnia 21.07.2021
Nabywca-Płatnik: CENTRUM BADAŃ KLINICZNYCH PIOTR NAPORA
LEKARZE SPÓŁKA PARTNERSKA
51-162 WROCLAW, DLUGOSZA 4
NIP : 8982070703

DW08

Sposób zapłaty : Przelew
Termin płatn. : 2024.10.08
Dokument magaz. : 3862053066 3862086418 3862086551
Wyjazd : 1061662

DW08 - rano /106166

Razem	Stawka	Wartość netto	Wartość VAT	Wartość brutto
	VAT 8	543,42	43,47	586,89
	VAT 23	24,76	5,69	30,45
	Razem:	568,18	49,16	617,34

Do zapłaty zł 617,34

Słownie: sześćset siedemnaście zł trzydzieści cztery gr

Sugerowana wartość detaliczna brutto zł : 821,40

*** Przed dokonaniem płatności prosimy o weryfikację poprawności naszego numeru rachunku w Państwa systemie obsługi płatności. ***

Klient podpisując fakturę potwierdza, że zapoznał się z terminem płatności oraz ze wszystkimi elementami faktury, potwierdza odbiór towaru w ilości i rodzaju objętym niniejszą fakturą.

NEUCA SA
87-100 Toruń, ul. Forteczna 35-37
KRS: 0000049872
Hurtownia Farmaceutyczna we Wrocławiu
54-610 Wrocław, ul. Graniczna 8a

Podpis i pieczęćka
osoby uprawnionej

Małgorzata Choroszy

do odbioru faktury

Podpis osoby uprawnionej

Pokwitowanie odbioru towaru data, godzina i podpis

do wystawiania faktury pieczęć, podpis

Potwierdzam właściwe warunki dostawy leków

Administratorem danych osobowych jest NEUCA SA, 87-100 Toruń, ul. Forteczna 35-37.
Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych dostępne są na stronie www.neuca.pl w zakładce Kontakt / Dane osobowe.
Spółka NEUCA SA posiada status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu art. 4c. Ustawy z dnia 9 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych.

INFO-FARM	Polska	PL							
5. TERMOM.EL.DIAGNOSTIC BEZDOT.NC PRO	do 25		2	213.97	148.59				
DIAGNOSTIS	Polska	PL				23.77	320.95		
						8	297.18		
Podsumowanie częściowe:						Suma netto	Suma VAT	Suma brutto	
						VAT 8	371.38	29.71	401.09
						VAT 23	24.76	5.69	30.45
							396.14	35.40	431.54

Uwagi : ..NEUCA S.A. Numer BDO: 000039852
WAŻNE: Zmiany w rozliczaniu faktur korygujących "in minus" (Slim VAT)
 Aby dostosować się do wymogów ustawy VAT art. 29a ust.13, wypełnij
 formularz w Aptelink.pl/Medlink.pl moduł Moje Finanse.

 GIF 24/WC/2024 z dnia 20.09.2024 Atofab (Atomoxetine), kapsułki twarde,
 25 mg, opakowanie 28 kapsulek, GTIN 09008732012224 w seria numer:
 E01580, termin ważności 30.04.2025 r. Atofab (Atomoxetine), kapsułki
 twarde, 40 mg, opakowanie 28 kapsulek, GTIN 09008732012231 seria numer:
 F06874, termin ważności 30.04.2025 r. podmiot odpowiedzialny: G.L.
 Pharma GmbH

Decyzja Producenta z dnia 17.09.2024 wycofanie z obrotu wyrobu
 medycznego DICLOTICA THERMAL - plaster rozgrzewający, wszystkie serie,
 wytwórca: NEOTAC Pharma

Decyzja GIF 23/WC/2024 z dnia 18.09.2024 wycofanie z obrotu:
 Corhydron 25mg, opakowanie 5 fioł, GTIN 05909991047610, seria: 110021
 ,d.w.: 09.2024; podmiot odpowiedzialny: Bausch Health Ireland

Decyzja GIF 22/WC/2024 z dnia 13.09.2024 wycofanie z obrotu:
 Faringan tabletki do ssania, 5 mg + 1,5 mg, wszystkie wielkości op,
 wszystkie serie; podmiot odpowiedzialny: Solinea sp. z o.o.

Decyzja Producenta z dnia 09.09.2024 wycofanie z obrotu BIARON BABY 24M+
 30 kaps. seria 011123, Phytopharm Kłęka S.A.

Szczegółowe informacje dotyczące wycofanych produktów znajdują się na
 stronie <https://rdg.ezdrowie.gov.pl>